


1 Установка мобильного приложения



android 

Чтобы установить мобильное приложение Nova Health на Android, перейдите в магазин Google Play отсканировав QR-код

- 1 В Google Play откроется страница приложения NovaHealth. Нажмите **«Установить»**.

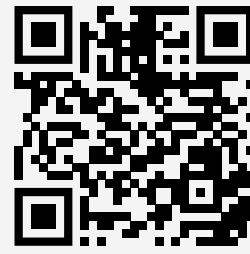

В настоящее время приложение Nova Health для iOS находится на стадии бета-версии; установите его, следуя инструкциям ниже:

- 1 Начните с установки приложения TestFlight в AppStore.
- 2 Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке ниже: <https://testflight.apple.com/join/UUQw0cM2>
- 3 Нажмите кнопку **«Начать тестирование»**, чтобы открыть приглашение к установке в приложении TestFlight.
- 4 Нажмите **«Принять»**, чтобы принять приглашение. Приняв приглашение, нажмите **«Установить»**, чтобы установить приложение NovaHealth.

2 Регистрация

Пожалуйста, создайте учетную запись при запуске приложения NovaHealth.



Подробнее

- 1 Нажмите **«Зарегистрироваться»** в нижней части экрана **«Добро пожаловать»**.
- 2 Заполните поля **«Имя»**, **«Фамилия»** и **«Отчество»** (если нужно) и нажмите кнопку **«Продолжить»**.
- 3 Заполните данные для входа в систему, следующие поля: **«Ваш номер телефона»**, **«Ваш e-mail»** и **«Пароль»**.
- 4 Получите подтверждение по электронной почте от **«cardio@letsnova.com»**. Нажмите кнопку **«Подтвердить»** в электронном письме. Вы будете перенаправлены в приложение.

4 Подключение к Nova Cardio

Приложение Nova Health подключается к устройству Nova Cardio через Bluetooth.



Подробнее

- 1 Поместите устройство в беспроводное зарядное устройство. Светодиодные индикаторы загораются и/или мигают, сигнализируя о том, что устройство заряжается.
- 2 Нажмите синюю кнопку **«+»** в приложении Nova Health; появится уведомление с просьбой разрешить использование Bluetooth. Нажмите кнопку **«Разрешить»**, чтобы продолжить.
- 3 Приложение начнет поиск устройств. Выберите устройство для подключения.
- 4 Появится уведомление, предлагающее сопрячь устройство с телефоном. Если потребуется ввести пароль, введите **«123456»** и нажмите кнопку **«Создать пару»**.

Что такое валидация?

Валидация при проведении измерения — это ключевой элемент, который гарантирует точность и достоверность полученных данных.



Подробнее

- Во время валидации мы рассчитываем пульс на основе сигналов ЭКГ и ФПГ, которые снимает ваше устройство. На экране измерения вы можете увидеть эти сигналы, и если рассчитанные пульсы на основе ЭКГ и ФПГ совпадают (с учетом настраиваемой погрешности), измерение успешно проходит валидацию.

3 Первое измерение

Чтобы использовать устройство с телефоном, его необходимо сопрячь через Bluetooth.



Подробнее

- 1 Поместите устройство в беспроводное зарядное устройство и дождитесь, пока загорятся все пять светодиодных индикаторов. Затем нажмите синюю кнопку **«+»** на главном экране приложения.
- 2 Ваш телефон запросит разрешение на использование Bluetooth и служб геолокации. В результатах поиска вы должны увидеть устройство Nova Cardio с четырьмя последними цифрами идентификатора.
- 3 Выберите устройство и выполните сопряжение с помощью кода **«123456»**.
- 4 После успешного сопряжения появится экран с предложением обновить устройство. Следуйте инструкциям.
- 5 Снимите устройство Nova Cardio с беспроводного зарядного устройства и нажмите **«Начать измерение»**.

! Индикация устройства (светодиоды)

Чтобы использовать устройство с телефоном, его необходимо сопрячь через Bluetooth.



Подробнее

- Когда **все 5 светодиодов** загораются одновременно, устройство заряжено и готово к работе.
- Устройство находится в режиме зарядки, если поочередно горят **от 1 до 5 светодиодов** (слева направо).
- Если первый светодиод (**led1**) горит постоянно, устройство находится в режиме соединения с телефоном.
- Устройство регистрирует сигналы быстрым миганием второго светодиода (**led2**).
- Если третий светодиод (**led3**) горит постоянно и работает так же, как и второй светодиод, устройство находится в режиме проверки ЭКГ.

Настройка валидации сигнала

- 1 После авторизации в приложении нажмите кнопку **«Профиль»** на экране **«Обзор»**.
- 2 Откроется страница вашего профиля. На этой странице выберите пункт меню **«Настройки»**.
- 3 В разделе **«Настройки»** выберите пункт **«Настройки валидации сигнала»**.
- 4 Откроется страница **«Настройки валидации»**, на которой вы увидите 4 переключателя. Вы можете выбрать любой уровень, который вам подходит, но рекомендуемый уровень — **«Средняя»**.



Подробнее

NOVACARDIO